

ISTRUZIONI PER L'USO E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

BENTU s.r.l. viale B. Vergine del Carmelo 20, 00144 Roma, P.I. 15541441000,
bentuenergia@gmail.com

Schermo facciale modello: Bentu4Visors

Schermo facciale conforme alla norma tecnica UNI EN 166:2004

La Dichiarazione di Conformità UE del presente DPI è consultabile sul sito: www.bentuenergia.com

Il prodotto è stato certificato da: CERTOTTICA Srl, Zona Industriale Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italia (NB0530).

Questo DPI è marcato CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425.

Marcatura dispositivo per la protezione degli occhi:

B	1	S	-	EN166	3	S	CE
---	---	---	---	-------	---	---	----

Identificativo del fabbricante - Classe Ottica (1=Lavoratori continui 0.06D), Simbolo della resistenza meccanica oculare (S=resistenza incrementata) - Norma tecnica applicata – Destinazione d'uso (3=Liquidi, Protezione contro le goccioline e spruzzi di liquidi), Simbolo della resistenza meccanica montatura (S=resistenza incrementata) – Marcatura CE,

Il dispositivo presenta una marcatura unica, dato che lenti e montatura costituiscono un unico pezzo.

AVVERTENZE:

- **Sostituire immediatamente se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni sul visore facciale e alterazioni delle cuciture;**
- **Non modificare o alterare il prodotto. Utilizzare ricambi idonei se previsto, contattando sempre il produttore;**
- **I materiali che vengono a contatto con la pelle dell'utilizzatore potrebbero causare reazioni allergiche;**
- **Maneggiare lo schermo facciale con cura per evitare rischi di abrasione cutanea dovuti a contatto con le parti plastiche di tessuto Dacron.**
- **Lo schermo facciale viene fornito in busta singola non sterile ed è riutilizzabile previa sanificazione.**

Revisione	Data di emissione	Stato
0	27/04/2020	Attiva

- Assicurarsi che lo schermo facciale quando indossato sia posizionato in maniera corretta a protezione degli occhi dell'utilizzatore, come riportato in Figura (linea di riferimento sopra l'arcata sopraccigliare)

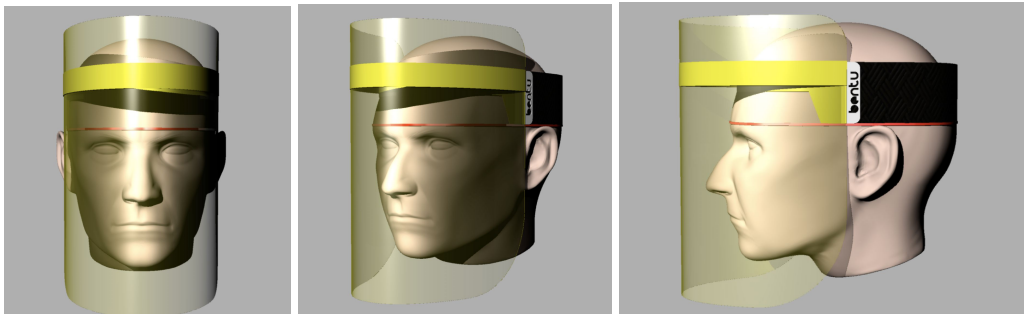


Figura: montaggio corretto dello schermo facciale Bentu4Visors

- I protettori dell'occhio contro le particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali oftalmici possono trasmettere impatti, generando pericoli per l'utilizzatore;
- Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore degli occhi dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera dell'impatto. Ad esempio FT, BT, AT;
- Se i simboli F, B, A non sono uguali sugli oculari e sulla montatura, bisogna assegnare al protettore visivo il grado di protezione più basso;
- Gli oculari in classe ottica 3 non sono adatti ad un uso prolungato.

CONSERVAZIONE:

Conservare gli il dispositivo di protezione in un luogo asciutto, lontano dalle radiazioni solari e dalle fonti di calore. L'occhiale dovrebbe essere trasportato e conservato nella sua confezione originale ad una temperatura compresa tra 5° e 40°C, con umidità < 80%. Trasportare solo nella confezione originale.

MANUTENZIONE:

Le lenti devono essere pulite con regolarità e quando necessario, utilizzando un panno inumidito con un detergente delicato, con aggiunta eventuale di un disinfettante per lenti e disinfettarle.

SMALTIMENTO DELL'OCCHIALE

Le lenti graffiate e danneggiate devono essere sostituite o smaltite.

Smaltire il prodotto dopo 5 anni dalla data di produzione.

RICAMBI E ACCESSORI

Contattare il fabbricante per informazioni aggiuntive sul prodotto interessato.

Revisione	Data di emissione	Stato
0	27/04/2020	Attiva