

ULTERIORI ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE SCHERMO FACCIALE BENTU4VISORS PER UTILIZZO IN AMBITO SANITARIO

BENTU s.r.l. viale B. Vergine del Carmelo 20, 00144 Roma, P.I. 15541441000,
bentuenergia@gmail.com

Schermo facciale modello: Bentu4Visors

Schermo facciale conforme alla norma tecnica UNI EN 166:2004

CORRETTO USO DELLO SCHERMO FACCIALE

Lo schermo facciale bentu4visors può offrire protezione massima qualora sia indossato insieme a una mascherina filtrante per la protezione di bocca e naso, e ad una cuffia usa e getta a protezione della parte superiore della testa, indossata in modo da proteggere la fascia elastica che assicura la visiera alla nuca.

MANUTENZIONE:

La visiera deve essere pulita con regolarità per garantirne la trasparenza, in modo da mantenere le proprietà ottiche inalterate durante il normale utilizzo.

Schermi la cui visiera sia graffiata o danneggiata devono essere subito sostituiti.

Per la sanificazione del dispositivo si consiglia di utilizzare disinfettanti a base di cloro; in particolare, si suggerisce di nebulizzare sulla visiera una soluzione di ipoclorito di sodio diluito in acqua con composizione inferiore allo 0.5%.

Per le specifiche modalità di utilizzo del disinfettante si rimanda alle istruzioni del particolare prodotto selezionato.

Per informazioni sull'efficacia dell'utilizzo dei disinfettanti in ambito sanitario si rimanda alle indicazioni disponibili sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità <https://www.iss.it/publ>.

La sanificazione deve essere condotta al termine di ogni procedura di svestizione in caso si sia entrati in contatto con individui potenzialmente infetti.

Revisione	Data di emissione	Stato
0	21/05/2020	Attiva